



## Gebruiksaanwijzing Behandelstoel BEAUTY



Martini Beauty B.V.  
Tel: 085-0450056  
E-mail: [info@martinibeauty.nl](mailto:info@martinibeauty.nl)  
[www.martinibeauty.nl](http://www.martinibeauty.nl)

## INHOUD

Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop.

<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>3</b>
<b>TOEPASSING .....</b>	<b>4</b>
<b>BEDIENING EN AANSLUITING .....</b>	<b>4</b>
<b>INGEBRUIKNAME.....</b>	<b>5</b>
<b>BEDIENING.....</b>	<b>5</b>
<b>REINIGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>7</b>
<b>STORINGEN EN OPLOSSINGEN .....</b>	<b>8</b>
<b>REPARATIE EN ONDERHOUD.....</b>	<b>8</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS.....</b>	<b>8</b>
<b>VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT, OPSLAG EN GEBRUIK.....</b>	<b>9</b>
<b>AFVOEREN .....</b>	<b>9</b>
<b>INHOUD VAN DE LEVERING.....</b>	<b>9</b>

## Veiligheidsvoorschriften

- Lees voor ingebruikname van de behandelstoel de gebruiksaanwijzing. Lees de aanwijzingen aandachtig door, daar deze belangrijke informatie bevatten met betrekking tot de ingebruikname, gebruik en onderhoud van het apparaat.
- Bij oneigenlijk gebruik van deze stoel of bij ander gebruik dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing, zal alle garantie of aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.
- Het besturingsdeel mag alleen door de fabrikant of door de fabrikant geautoriseerd vakkundig personeel geopend worden.
- Kijk bij ontvangst van de behandelstoel eerst of alle onderdelen aanwezig zijn en/of niet door het transport beschadigd zijn. Bij twijfel kunt u zich het beste tot de klantenservice wenden.
- Gebruik uitsluitend een onbeschadigde stroomkabel voor het aansluiten van deze stoel. De kabel mag niet afgeklemd of geknikt zijn en mag geen hete voorwerpen aanraken (zoals bijv. verwarming of lampen).
- Als u een beschadiging aan de stroomkabel vaststelt, het apparaat uitzetten, de kabel niet aanraken, maar onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op de onze klantenservice. De stroomkabel nooit zelf vervangen.
- Controleer voor het gebruik of de aangegeven stroomsterkte (V) op het typeplaatje overeenkomt met de aanwezige voorzieningen, voordat u deze behandelstoel aansluit.
- Nooit met natte handen de stekker uit het stopcontact halen en nooit aan de stroomkabel trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Deze behandelstoel niet in vochtige ruimtes gebruiken of met vloeistof overgieten.
- Indien er per ongeluk vloeistof of een vreemd voorwerp in het besturingsdeel komt, direct de behandelstoel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem voor dat u het apparaat weer in gebruik neemt, contact op met onze klantenservice.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt, altijd de stekker uit het stopcontact halen.

## Toepassing

Deze behandelstoel is een volautomatische behandelstoel.

De zithoogte, kantelfunctie en rugleuning zijn dankzij drie hoogwaardige motoren, traploos in te stellen. De instelling gaat via een multifunctionele handbediening en een voetbediening.

De opklapbare armleuningen en een lage instap van ca. 27 cm, zorgen ervoor dat men makkelijk en aangenaam in de stoel gaat zitten of er uit opstaat.

De Beauty behandelstoel is geschikt voor alle schoonheidsbehandelingen en Cosmetische behandelingen zoals massages. Deze stoel is geschikt voor buik- en rugligging.

## Bediening en aansluiting



1	Hoofdsteun
2	Armleuning
3	Beensteun
4	Hendel om beensteun te verstellen
5	Rugleuning
6	Voetpedaal
7	Rugleuning verstellen
8	Stoel kantelen
9	Stoel omhoog/omlaag

## Ingebruikname

### 1. Behandelstoel neerzetten:

- Plaats de behandelstoel op een gladde, stabiele ondergrond.
- Met behulp van de schroeven aan de achterzijde in de voet van de stoel kunt u de behandelstoel verstellen, zodat deze stabiel en recht staat.
- Plaats de hoofdsteen in de houder van de rugleuning.
- Bevestig de hoofdsteen boven in het rugdeel.
- Verwijder na het plaatsen van de stoel, de transportbeveiliging en de andere verpakkingsmaterialen.

### 2. Behandelstoel aansluiten op het elektriciteitsnet.

- Controleer of de spanning (V) gelijk is aan wat op de typesticker staat.
- Steek de stekker in het stopcontact.

De behandelstoel is nu gebruiksklaar.

## Bediening





LET OP! Beklemmingsgevaar! De armen moeten zich tijdens het verstellen van de stoel op de arMLEUNINGEN bevinden.

Voetbediening moet zich tijdens het verstellen van de stoel NIET onder zitting of been gedeelte bevinden.





VOORZICHTIG! Verwondingsgevaar! Staat de stoel in de hoogste massage positie, zorg dan voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht. De stoel kan door een eenzijdige belasting naar voren kiepen.

### 1. Rugleuning verstellen:



- De hoek van de rugleuning kunt u als volgt aanpassen:
- Druk op de  toets (7) van de handbediening, om de rugleuning naar achteren in te stellen.
- Druk op de  toets (7) van de handbediening, om de rug naar voren te laten komen.

### 2. De hellingshoek van de stoel verstellen:

De hellingshoek van het zitgedeelte wordt vermeld,

- Druk op de  toets (8) van de handbediening, om de behandelstoel naar voren te kantelen.
- Druk op de  toets (8), om de behandelstoel naar achter te kantelen.

### 3. Instellen van de zithoogte (mogelijk met voetpedaal (6) en/of handbediening (9))

- Druk op de  toets (9) van de handbediening, om de behandelstoel te verhogen.
- Druk op de  toets (9), om de behandelstoel te verlagen.

De stoel kan hoger of lager om tot de gewenste zithoogte te komen.

#### **4. Beensteunen en voetsteun verstellen:**

De been- en voetsteun worden onafhankelijk van het zit- en rug gedeelte handmatig versteld.



LET OP! De voetsteun moet bij de instap en afstap positie, als ook bij de laagste positie altijd volledig ingeschoven zijn.

- Zet de beensteun handmatig op de gewenste hoogte. De beensteun vergrendelt vanzelf.
- Gebruik de hendel (4) onder de beensteun om de vergrendeling op te heffen en om de beensteun te laten zakken.
- Maak de vergrendelschroef onder aan de beensteun los, om het voetdeel in- of uit te schuiven.
- Het voetdeel weer vastzetten, door de schroef goed aan te draaien.

#### **5. Armleuningen verstellen:**

Beide armleuningen kunnen 180° naar achter wegklappen.

- Trek de armleuning naar boven.
- Draai de armleuning naar beneden.

ArMLEuning omhoog draaien:

- Draai de armleuning naar boven.
- Druk de armleuning naar beneden totdat deze vastklikt.

#### **6. Hoofdsteun verstellen:**

- Draai de vergrendelschroeven aan de rugleuning los.
- Zet de hoofdsteun in de gewenste positie.
- Draai de vergrendelschroeven weer goed vast, om de hoofdsteun te zekeren.

#### **7. Behandelstoel uitzetten:**

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.

## Reiniging en Onderhoud



### **Voorzichtig!**

Kans op stroomschok!

Voor elke reiniging de stekker uit het stopcontact halen!

- De bekleding van de behandelstoel kunt u schoonmaken met warm water en een schone doek. We raden het gebruik van Microvezel doekjes of reinigingshandschoenen aan.
- Verwijder sterke vervuilde plekken met een mild reinigingsmiddel.
- Verwijder hardnekkige vlekken met een desinfectie- en reinigingsschuim.
- Om te voorkomen dat vlekken in de bekleding indringen, raden wij u aan om vlekken direct te verwijderen.
- Reinig het gestel van de behandelstoel en het voetpedaal met een licht vochtige doek. Let er op dat er geen vocht in de besturing of in het pedaal komt.



### **Let op!**

- Om de bekleding te desinfecteren bevelen wij Desinfectie- en reinigingsschuim aan.
- Desinfectiemiddelen nooit in de bekleding wrijven.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals, chloride, schuurmiddel, synthetisch reinigingsmiddel, boenwas, luchtverfrissers of agressieve reinigingsproducten. Deze kunnen de bekleding en de stoel beschadigen.
- Gebruik geen middelen die olie of vet bevatten, om de bekleding te reinigen.

## Storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Automatische verstelling van de behandelstoel werkt niet.	Stroomkabel niet juist aangesloten.	Controleer of de kabel niet beschadigd is. Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.

Bij andere storingen graag direct contact opnemen met onze technische dienst. Tel: 085-0450056

## Reparatie en Onderhoud

De behandelstoel heeft bij normaal gebruik geen extra onderhoud nodig. Indien er toch problemen optreden, neemt u dan direct contact op met onze klantenservice. Reparatie en Onderhoud mogen alleen door onze technische dienst of door de fabrikant uitgevoerd worden. Bij veranderingen en reparaties door derden zal de garantie van de fabrikant vervallen en kan de veiligheid van de behandelingsstoel niet gewaarborgd worden.

## Technische gegevens

Artikelnummer:	4002	
Spanning/Wisselstroom:	100 V~/ 50-60 Hz	
Vermogen	200 VA	
Afmetingen	Breedte incl. de armleuningen	69 cm
	Lengte	182 cm
	Lengte beensteunen	55 cm
	Hoofddeel uitschuifbaar	20 cm
	Voetgedeelte uitschuifbaar	20 cm
	Zithoogte	51-100 cm
	Diepte van de zitting	48 cm
Maximale belasting	200 kg	
Gewicht behandelstoel	75 kg	



## Voorwaarden voor transport, opslag en gebruik

Transport alleen in de originele verpakking van de fabrikant.

Transport- en opslag temperatuur: -20 °C tot +50 °C

Gebruikstemperatuur: +10 °C tot +40 °C

Relatieve Luchtvochtigheid: Max. 90% niet gecondenseerd


Hevige temperatuurschommelingen vermijden i.v.m. condensvorming. Gebruik het apparaat pas nadat het heeft kunnen acclimatiseren.

## Afvoeren

Bewaar de originele verpakking voor verzending.

Overbodige verpakking, stoel en toebehoren graag bij de daarvoor aangewezen instanties afvoeren, volgend de daarvoor geldende milieuregels.

Alle elektro- en elektronische apparaten moeten gescheiden van het normale huisvuil worden aangeboden.

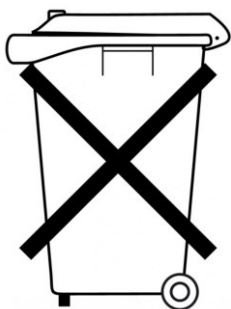

Wanneer u dit symbool; een afvalcontainer met een kruis erdoor, op een product ziet staan, dan valt dit product onder de Europese richtlijnen 2002/96/EC en mag het niet met normaal huisvuil aangeboden worden. Deze producten moet u zelf afleveren bij de milieustraat bij u in de buurt. De correcte verwijdering en gescheiden inzameling van gebruikte apparaten dient ter voorkoming van schade aan milieu en gezondheid. Het is een voorwaarde voor hergebruik en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

## Inhoud van de levering

1 x Behandelstoel

1 x voetpedaal

1x handbediening